

PRODUCTNAAM EN KLEUR	GIPSSOORT	MENGVERHOUDING	VERWER- KINGSTIJD (CA.)	AFBINDTIJD (CA.)	EXPANSIE NA 2 UUR	EXPANSIE NA 24 UUR	HARD- HEID NA 2 UUR	HARD- HEID NA 24 UUR
KLASSE 1	SNELLE REPARATIES, ARTIKULATORGIPS, GIPSSLOTJES							
Afdruk gips wit, roze	Natuur	100 gr : 50 ml.	1 min.	2,5 min.	0,06%	0,07%	20	30
Artifix "extra wit"	Synthese	100 gr : 30 ml.	3 min.	6 min.	0,04%	0,03%	60	70
Artikulatorgips 3 minuten	Synthese	100 gr : 30 ml.	1,5 min.	3 min.	0,04%	0,03%	50	60
Artikulatorgips 8 minuten	Synthese	100 gr : 30 ml.	4 min.	8 min.	0,04%	0,03%	50	60
Artikulatorgips 4,5 minuten	Natuur	100 gr : 40 ml.	2 min.	4,5 min.	0,05%	0,04%	40	50
Artikulatorgips 8 minuten	Natuur	100 gr : 40 ml.	4 min.	8 min.	0,05%	0,04%	40	50
Bella-Art wit	Natuur	100 gr : 40 ml.	3 min.	5 min.	0,06%	0,04%	40	50

KLASSE 2	INBEDGIPS (cuvettengips)							
Normaal hard, wit	Natuur	100 gr : 50 ml.	8 min.	20 min.	0,20%	0,18%	30	40
Normaal hard Snelafb., wit	Natuur	100 gr : 50 ml.	4 min.	10 min.	0,20%	0,18%	30	40
Semi-Hard, wit	Natuur	100 gr : 40 ml.	7 min.	15 min.	0,17%	0,15%	40	50

KLASSE 3	PROTHESE - EN TEGENBEETMODELLEN, INBEDDEN							
Extra Hard wit	Natuur	100 gr : 30-32 ml.	5 min.	12 min.	0,15%	0,13%	60	70
Durofix (pastelkleuren) blauw, groen, geel	Natuur	100 gr : 30-32 ml.	5 min.	12 min.	0,15%	0,13%	60	70
Duradur (extra ingekleurd) wit, blauw, groen, geel, roze	Natuur	100 gr : 30-32 ml.	5 min.	12 min.	0,14%	0,13%	70	85
Duradur wit langzaam afb. wit, blauw, roze	Natuur	100 gr : 30-32 ml.	8 min.	20 min.	0,14%	0,13%	70	85
Delta White langzaam afbindend	Synthese	100 gr : 30 ml.	7 min.	15 min.	0,12%	0,10%	75	90
Delta Blue , White, Yellow, Pink	Synthese	100 gr : 30 ml.	5 min.	12 min.	0,12%	0,10%	75	90
Super-Art wit	Synthese	100 gr : 30 ml.	7 min.	14 min.	0,11%	0,09%	65	80
Super-Art snelafbindend wit	Synthese	100 gr : 30 ml.	4 min.	10 min.	0,11%	0,09%	65	80

KLASSE 3	PROTHESE -EN TEGENBEETMODELLEN "DUBBEL GEMALEN GIPS"							
Heborock roze	Natuur	100 gr : 30 ml.	7 min.	15 min.	0,13%	0,12%	90	110
Moldano blauw	Natuur	100 gr : 30 ml.	4 min.	7 min.	0,16%	0,18%	180	190
BlueRock, YellowRock	Synthese	100 gr : 30 ml.	7 min.	14 min.	0,10%	0,09%	100	120
Pinkrock	Synthese	100 gr : 30 ml.	5 min.	10 min.	0,10%	0,09%	100	120

KLASSE 4	ORTHODONTIE - EN STUDIEMODELLEN							
Gildont Sneeuw wit	Synthese	100 gr : 25 ml.	5 min.	10 min.	0,10%	0,08%	130	150
WhiteStone extra wit	Synthese	100 gr : 20 ml.	5 min.	10 min.	0,12%	0,10%	210	300
Gildent wit	Synthese	100 gr : 20 ml.	5 min.	10 min.	0,10%	0,08%	215	260
OrthoRock Plus superwit	Synthese	100 gr : 28 ml.	5 min.	10 min.	0,12%	0,10%	110	130

KLASSE 4	FRAMEWERK							
UltraStone wit, groen, bruin, geel	Natuur	100 gr : 22 ml.	5 min.	10 min.	0,10%	0,08%	170	210
Gilstone wit, roze	Synthese	100 gr : 23 ml.	5 min.	10 min.	0,10%	0,08%	120	170
BellaStone wit, goudbruin, peach	Synthese	100 gr : 23 ml.	5 min.	10 min.	0,09%	0,08%	230	240

Alle technische specificaties en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen en druk en zet fouten voorbehouden

PRODUCTNAAM EN KLEUR	GIPSSOORT	MENGVERHOUDING	VERWER- KINGSTIJD (CA.)	AFBINDTIJD (CA.)	EXPANSIE NA 2 UUR	EXPANSIE NA 24 UUR	HARD- HEID NA 2 UUR	HARD- HEID NA 24 UUR
KLASSE 4	DEFINITIEVE MODELLEN, TEGENBEET MODELLEN, PROTHESE MODELLEN, SOKKELGIPS							
Semirock roze, Semirock wit	Synthese	100 gr. : 26 ml.	5 min.	10 min.	0,12%	0,10%	110	135
Semirock roze langzaam afb.	Synthese	100 gr. : 26 ml.	7 min.	14 min.	0,12%	0,10%	110	135
Gilrock Super roze	Synthese	100 gr. : 25 ml.	6 min.	12 min.	0,10%	0,09%	130	160
DeltaRock roze	Synthese	100 gr. : 25 ml.	5 min.	10 min.	0,10%	0,08%	140	170
UltraRock wit, geel, goudbruin, roze	Natuur	100 gr. : 24 ml.	6 min.	12 min.	0,12%	0,10%	150	190
Sokkeldent (stapelbaar) wit	Synthese	100 gr. : 25 ml.	4 min.	8 min.	0,09%	0,08%	110	150
Sokkeldent FL (vloeibaar) wit, citroengeel, groen	Synthese	100 gr. : 23 ml.	5 min.	9 min.	0,09%	0,08%	110	150
Sokkel Plus FL (vloeibaar) donkerblauw	Synthese	100 gr. : 23 ml.	4 min.	8 min.	0,08%	0,08%	130	170

KLASSE 4	ALLE KERAMIEK-EN METAAL TECHNIEK. K+B, TANDARKRANSEN, LOSSE STOMPEN E.D.....							
Gildent wit, goudbruin	Synthese	100 gr. : 20 ml.	5 min.	10 min.	0,10%	0,08%	215	260
Stardent goudbruin, abrikoos, ivoor	Synthese	100 gr. : 18-20 ml.	8 min.	18 min.	0,10%	0,08%	220	250
EuroRock goudbruin, Pastelgeel	Synthese	100 gr. : 20 ml.	7 min.	12 min.	0,10%	0,09%	240	270
UltraDent goudbruin, wit, ivoor, groen, grijs	Natuur	100 gr. : 20 ml.	6 min.	12 min.	0,10%	0,08%	240	290
DeltaDent Plus wit, pastelgeel, goudbruin	Synthese	100 gr. : 20 ml.	5 min.	10 min.	0,10%	0,08%	290	340
BellaRock Goudbruin, ivoor, abrikoos	Synthese	100 gr. : 20 ml.	6 min.	12 min.	0,09%	0,08%	300	320
Gilplast Goudbruin, pastelgeel	Synthese	100 gr.: 18-10 ml.	8-10 min.	17 min.	0,10%	0,08%	220	230

KLASSE 4	CAD-CAM SYSTEMEN (cerec)							
CAM-Stone N Roodbruin	Natuur	100 gr. : 20 ml.	4 min.	7-9 min.	0,08%	0,06%	240	270

KLASSE 5	SUPER HARDGIPS, MET EEN HOGE EXPANSIE VOOR EEN SPECIALE DENTALE TECHNIEK							
MarmoDie groen, goudbruin	Natuur	100 gr. : 21 ml.	6-7 min.	10-13 min.	0,22%	0,20%	220	250
Marmorock® E goudbruin	Natuur	100 gr. : 20 ml.	6-7 min.	12-14 min.	0,27%	0,25%	240	270

Alle technische specificaties en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen en druk en zet fouten voorbehouden.